



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde

ANEXO 2 – INSTRUÇÕES DE COLETA DELIBERAÇÃO Nº 75/CIB/2018

CARIÓTIPO (*Banda G*) EM SANGUE PERIFÉRICO

Método de coleta: Coleta de sangue periférico.

Dias de recebimento: 2ª a 6ª feira, no horário comercial.

Transporte: dentro do próprio tubo ou seringa descartável, heparinizada, acondicionada em isopor, com gelo reciclável (NUNCA CONGELAR NEM ENCONSTAR NO GELO).

Prazo de entrega do resultado: 30 dias.

INSTRUÇÕES DE COLETA

Coleta com tubos coletores: 5 - 10 ml de sangue periférico acondicionados nos tubos coletores com heparina (de tampa verde ou azul).

Coleta com seringa: heparinizar a seringa descartável (marca BD), com 0,1 a 0,2 ml de Liquepine Roche ou com heparina sódica. Trocar a agulha. Colher assepticamente 5 - 10 ml de sangue periférico. Recolocar o protetor de plástico da agulha. Vedar a junção agulha/seringa e imobilizar o êmbolo com Parafilme ou similar.

1. Acondicionar em caixa de isopor com gelo reciclável, precavendo-se para que o mesmo não entre em contato direto com o material, evitando o congelamento.

2. Após a coleta, o material deve ser encaminhado **imediatamente** ao laboratório NEUROGENE (caso seja necessário mandar no outro dia, manter REFRIGERADO - NÃO CONGELAR).

3. Todos os exames devem conter as seguintes informações: Nome do paciente, nome do médico, número do protocolo, data de nascimento (se menor, deve constar o nome dos pais ou responsável), dados clínicos dos pacientes (necessários ao processamento e à interpretação dos exames) e a data da coleta do sangue.

Observação: As coletas **não** precisam ser realizadas com o paciente em jejum.

OS DADOS COMPLETOS DOS PACIENTES TORNAM-SE INDISPENSÁVEIS PARA A LIBERAÇÃO DOS LAUDOS.